



# Flexima® 3S Uro | Bezpieczeństwo w ruchu



Płytki stomijne standardowa (op. zawiera 5 szt.)		Średnica (mm)	Nr ref.	Worki urostomijne (opakowanie zawiera 30 szt.)	Średnica (mm)	Nr ref. (beżowy)	Nr ref. (przezroczysty)
		45/ 15-30	936415		45	● 934045	○ 934145
		55/ 15-40	936515		55	● 934055	○ 934155
		65/ 15-50	936615		65	● 934065	○ 934165
		80/ 15-65	936815				
				<b>Akcesoria</b>	<b>I. opakowanie</b>	<b>Nr ref.</b>	
				B. Braun pas zabezpieczający do stomii		5028	
				Worek do zbiórki moczu ( 2l)	(opakowanie zawierające 30 sztuk)	28300	

Dystrybutor:



60-573 POZNAŃ, ul. Lindego 6  
tel. 61 841-16-12; infolinia 801 30 55 77  
www.pofam.poznan.pl

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,  
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# *Flexima*<sup>®</sup> 3S Uro

Bezpieczeństwo w ruchu.



Najnowsza generacja elastyczno-mechanicznego systemu 2-częściowego

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Prosty i bezpieczny system łączenia

Proste pozycjonowanie od początku: 3 proste etapy zakładania worka

- 1 Wprowadzić wypustkę worka stomijnego
- 2 Nałożyć pierścień worka na ryżę płytki kierując się ku górze
- 3 Zablokować w tej pozycji system zabezpieczający

Jeszcze większa szczelność dzięki dokładnie dopasowującemu się systemowi łączenia elastyczno-mechanicznego

Dodatkowe poczucie bezpieczeństwa zwiększone przez słyszalne kliknięcie



## Nowatorskie rozwiązanie ujęcia worka

 Ujęcie worka *na dzień*

- **Czytelne położenie** otwarte/zamknięte
- **Dopracowana budowa zatrzasków** – słyszalne kliknięcie w momencie zamknięcia
- **Łatwość użytkowania:** Nie ma ryzyka przeciekania



Zamknięty



Otwarty

 Ujęcie worka *na noc*

- **Słyszalne kliknięcie** podczas połączenia z łącznikiem
- **Łatwość połączenia** z nocnym workiem do zbiórki moczu
- **Otwór odpływowy** zaprojektowany w sposób uniemożliwiający przekręcenie worka




Łącznik zapobiegający przekręcaniu



Bezpośrednie połączenie z workiem do zbiórki moczu

# Miękka i bezpieczna płytką stomijna

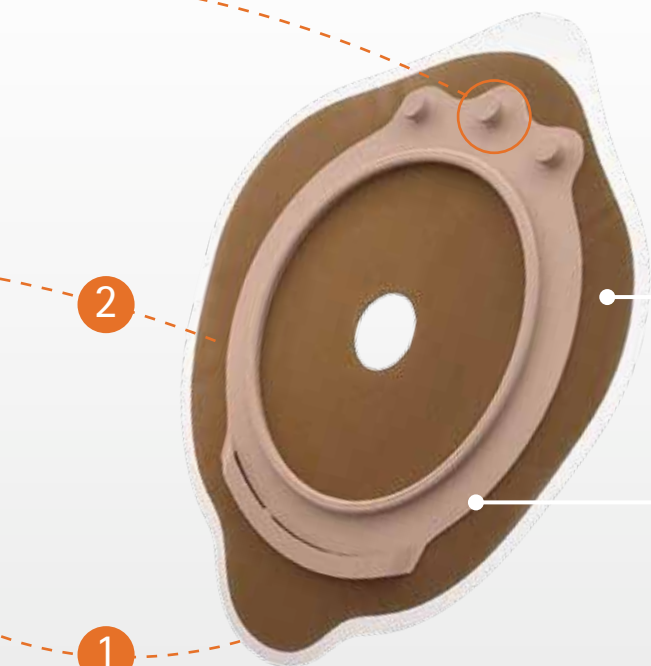

## Hydrokolooidowa ochrona skóry:

- Odporna na niszczące działanie moczu\*
- Pokryta łatwo usuwalną folią zabezpieczającą



## Wysoki stopień komfortu:

- swobodny kołnierz chroni przed dyskomfortem podczas zakładania
- utrzymuje elastyczność po połączeniu worka i płytki

## Flexima® 3S Uro

### 92%

pacjentów urostomijnych oceniło produkt Flexima® 3S Uro\*\* jako „dobry” lub „bardzo dobry” w kontekście szczelności.

“System jest nadzwyczaj bezpieczny. Łatwy do dopasowania, nie występują nieszczelności pomiędzy płytką stomijną a workiem. Praktyczna jest możliwość użycia paska”

pacjent

\*Ankieta dotycząca jakości życia pacjentów stosujących jednoczęściowy worek urostomijny z hydrokolooidową osłoną skóry (listopad 2005- styczeń 2006)

\*\* Testy akceptacyjne wykonane we Francji w okresie 08.2012-01.2013 w populacji pacjentów z urostomią